


MHeye Ltd



BMOIST

Figure 1

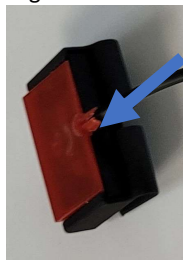

Przsuwać
nagrzewa-
-jące
pudełko w
slizgaczy

Figure 2



BMOIST
podłączony
do Power
Banku.

Figure 3



Power Bank
z kablem do
ładowania

Figure 4



Części

Figure 5

MHeye Ltd



BMOIST Instrukcja użycia

Przeznaczenie

Urządzenie zasilane energią, ogrzewające oko i jest przeznaczone do dostarczania zlokalizowanego ciepła w okolicy oczu w celu relaksacji.

Jak to działa

BMOIST działa poprzez podgrzewanie powiek, dlatego jest całkowicie wolny od chemikaliów. Lokalne ogrzewanie to fizyczny sposób działania polegający na krótkotrwałej (5 min.) aplikacji ciepła (maks. 45°C) na powiekę, co jest wystarczające, aby wywołać reakcję organizmu, która zapewni nawilżenie oka.

Kto NIE powinien używać BMOIST

- osoby po operacjach oczu, u których objawy pooperacyjne jeszcze nie ustąpiły.

- osoby z zapaleniem oka, zapaleniem spojówek, zapaleniem rogówki, zapaleniem tęczówki przedniej

- osoby które nie mogą zamknąć oka.

- bepośrednio po aplikacji maści, kremów, balsamów itp.

Częstotliwość użycia

- no ogół 2-3 razy dziennie, ale nie więcej niż 5 razy dziennie, z minimalnym odstępem 4 godzin.

- Po kilku miesiącach, gdy objawy suchego oka poprawią się i staną się mniej nasilone, częstotliwość użycia można zmniejszyć.

Opakowanie BMOIST zawiera (rys. 5):

- BMOIST (rys. 1)
- Power Bank (rys. 4)
- Kabel do ładowania (rys. 4)
- Instrukcja dla użytkownika
- Instrukcja obsługi Power Banku

Przed użyciem BMOIST:

- Sprawdź, czy skrzynka grzewcza i suwak nie są uszkodzone.
- Naładuj Power Bank (P.B.). Podczas ładowania P.B. wbudowana czerwona lampka na P.B. miga. P.B. jest w pełni naładowany, gdy czerwona lampka przestaje migać.

Sposób użycia

- Bez podłączania do P.B. umieść skrzynkę grzewczą na okularach (rys. 2), nasuwając skrzynkę grzewczą na lewą lub prawą soczewkę okulara czerwona stroną skierowaną w stronę oka.
- Założ okulary i upewnij się, że skrzynka grzewcza znajduje się poniżej brwi. Jeśli czerwona skrzynka grzewcza jest zbyt wysoko zsuń ją rys 2. Gdy umieścisz BMOIST w ten sposób zdejmij okulary.
- Oczyść powiekę z makijażu.
- Podłącz kabel USB do Power Banku. Sprawdź, czy czerwona płytka jest podświetlona, oznacza to, że BMOIST jest aktywowany (rys. 3).
- Zamknij oko które masz nagrzewać i załóż okulary z przymocowanym BMOIST.
- Sesja dla jednego oka trwa około 5 minut. Po zakończeniu sesji podświetlenie czerwonej płytki gaśnie, co oznacza, że BMOIST jest nieaktywny. Odłącz Power Bank.
- Aby reaktywować BMOIST, ponownie podłącz go do Power Banku.
- Powtórz tę samą procedurę dla drugiego oka, jeśli potrzebujesz. Zaleca się poczekać 5 minut przed sesją drugiego oka.
- Po zakończeniu sesji zdejmij okulary, usuń BMOIST z okularów, odłącz Power Bank i umieść wszystko z powrotem do pudełka.

Informacje dotyczące czyszczenia

Do czyszczenia czerwonej powierzchni, użyj małej szmatki z mydłem i wodą. Nie używaj detergentów takich jak kwasy, zasady ani alkoholu, które mogą uszkodzić powiekę. Nie używaj przedmiotów, które mogą uszkodzić lub porysować czerwoną powierzchnię.

Uwaga

- Zabrania się używania BMOIST podczas ładowania Power Banku!!

Zanotuj

- BMOIST musi być odłączony od Power Banku, gdy nie jest używany.
- Przerwij sesję, jeśli poczujesz dyskomfort lub zauważysz zmianę w działaniu BMOIST!

- Używaj BMOIST tylko do relaksacji suchych oczu.

- Nie używaj BMOIST w wilgotnym środowisku, takim jak łazienka, deszcz, gęsta mgła.

- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

- Nie przekazuj, nie sprzedawaj, nie wynajmuj ani nie pozwalaj na używanie swojego urządzenia przez inną osobę.

- Nie modyfikuj tego urządzenia.

- Chroń urządzenie przed wysoką wilgotnością i kontaktem z cieczami

Dane techniczne

Zasilanie – 5V DC. Power Bank jest dostarczany

Power Bank musi być używany zgodnie z jego instrukcją obsługi.

Zużycie energii – maks. 1W

Źródło ciepła – dioda IR LED

Maks./Min. temperatura otoczenia podczas pracy – 35°C/0°C

Maks./Min. temperatura otoczenia podczas przechowywania i transportu – 60°C/-20°C

Wilgotność podczas pracy maks. – 75%

Maks. temperatura panelu – +45°C

Czas ciągłej pracy – 5 min

Wymiary skrzynki grzewczej – 45x30x15 mm

Długość kabla – 1 m

Typ złącza – USB C żeńskie

Waga bez Power Banku – 32 g

Waga opakowania – 218 g

Minimalna grubość okularów – 2 mm

Maksymalna grubość okularów – 5,5 mm

Materiał obudowy – plastik MABS

Zgodność z następującymi normami: IEC 60601-1; IEC 60601-1-11; IEC 60601-1-2; IEC 60601-2-57; IEC 62471; ISO 10993-1; UL94; IEC 62133-2

Instrukcje dotyczące przechowywania

Przechowuj BMOIST w miejscu chronionym przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego i w suchym miejscu.

Symbole na BMOIST

Na urządzeniu BMOIST znajdują się następujące symbole:



CE mark for Europe.



Temperature
Limit



utilizacja urządzeń
elektronicznych



Fragile, handle
with care



Producent



2024-09



Urządzenie
medyczne



Unique Device
Identifier



Zapoznaj się z
instrukcją
użytkownika



Single User



Trzymaj w suchości



Lot Number



Wytyczne dotyczące
transportu baterii
litowych



Authorized
representative



Numer Katalogowy



Postępuj zgodnie
z instrukcją
użytkownika



Ograniczenie
wilgotności

MedNet EC-REP GmbH

Borkstrasse 10,

48163 Münster, Germany

Tel: +49 251 3236664



MedNet EC-REP GmbH

Borkstrasse 10,

48163 Münster, Germany

Tel: +49 251 3236664

Polityka WEEE (zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego)

Dyrektywa Europejska 2012/19/UE dotycząca WEEE wymaga odpowiedniego utylizowania sprzętu elektronicznego i elektrycznego, gdy osiągnie koniec swojej żywotności. Symbol przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że produkt ten nie może być usuwany z innymi odpadami; musi być przekazany do zatwierdzonego zakładu recyklingu lub do wyznaczonego punktu zbiórki elektrośmieci, zgodnie z lokalnym prawodawstwem.

Gwarancja BMOIST

Producent udziela dwunastomiesięcznej gwarancji.

W przypadku pytań dotyczących produktu i serwisu prosimy o kontakt:

Producent:

MHEYE Ltd.

Fax: +97239664246

E-mail: office@the-moisteye.com

Data rewizji instrukcji użycia: 11.09.2024

Doc # 1026280824PL